

Prendersi cura degli apparecchi TCS:

Per mantenere come nuovo l'aspetto e l'apparenza del dispositivo, si prega di seguire questi semplici consigli:

1. Continua a lavarti i denti e le gengive naturali come indicato dal tuo dentista.
2. Sciacquare l'apparecchio con acqua corrente calda per rimuoverne particelle di cibo.
3. Opzionale: spazzolare delicatamente l'apparecchio con una spazzola morbida per protesi usando solo acqua. Risciacquare di nuovo.
4. Collocare l'apparecchio in un detergente per protesi per almeno 30 minuti al giorno. Raccogliamo di utilizzare TCS Concentrated DentureCleaner.
5. Sciacquare accuratamente l'apparecchio sotto acqua corrente prima di reinserimento in bocca.
6. Se possibile, tenere l'apparecchio in acqua o una soluzione per protesi quando non lo indossi.
7. Gli apparecchi estremamente sporchi devono essere immersi per tutta una notte nel detergente Denture Cleaner.

NON usare **candeggina, dentifricio** o prodotti per la pulizia simili



A) Detergente per apparecchi dentali TCS Denture Cleaner (Articolo # 4505-02)

Detergente professionale per la pulizia profonda di apparecchi dentali rimovibili. Unicamente formulato per mantenere l'aspetto e le caratteristiche delle protesi come nuove!
Scatola da 24 pz.(fornitura per 6 mesi).



Spazzola per protesi dentale (Articolo # 4506FR-01)

Spazzola a setole morbide per pulire a fondo i denti senza graffiare la superficie della protesi

Domande frequenti

Quanto durerà la procedura?

A volte una protesi parziale o una protesi totale può essere consegnata in appena due visite, ma di solito la media è di 4 visite. Circa dalle due alle sei settimane.

Il processo farà male?

I restauri TCS non sono invasivi, quindi c'è un minimo disagio. Per protesi parziali, a volte bisogna preparare i monconi, ma c'è poco disagio associato a questa procedura.

Quanto durerà la mia protesi?

I restauri TCS sono progettati per durare una vita intera. Le modifiche sono necessarie col passare del tempo a causa di cambiamenti naturali in bocca, è possibile modificare parzialmente la dentiera piuttosto che sostituirla.

Posso indossare la dentiera di notte?

Alcuni modelli di protesi potrebbero non essere raccomandati per l'uso durante notte. Chiedi al tuo dentista.

Avrò difficoltà a masticare?

Alcuni alimenti potrebbero non essere facili da masticare con la dentiera, ma una protesi TCS correttamente progettata e montata, unitamente alla resistenza del materiale, garantisce un adattamento superiore e ti darà la migliore esperienza di masticazione rispetto a qualsiasi altro materiale per protesi disponibile.

La protesi cambierà il modo in cui parlo?

A volte è difficile parlare chiaramente con i denti mancanti, pertanto, la protesi può migliorare la chiarezza del parlato. Se trovi difficile pronunciare certe parole, non ti preoccupare, nel tempo ti abituerai a parlare correttamente con il tuo nuovo apparecchio.

Posso apportare piccole modifiche alla mia protesi?

Si consiglia vivamente di non alterare l'apparecchio in alcun modo. Se sono necessarie regolazioni, si prega di contattare il proprio dentista.

Quanto tempo ci vorrà per adattarmi alle mie nuove protesi?

Normalmente è più facile abituarsi alla protesi perché si attaccano ai tuoi denti naturali. Una dentiera completa richiede l'uso di muscoli per lavorare in nuovi modi al fine di aiutare a stabilizzare la dentiera.

Dovrei considerare gli impianti?

Gli impianti dentali sono una possibile alternativa alla protesi.

Vengono chirurgicamente integrati nell'osso mascellare per contenere un dente sostitutivo o mantenere un ponte in posizione.

Impianti e ponti possono farti "Sentire" come se portassi denti veri, tuttavia sono significativamente più costosi delle protesi e il processo è invasivo.

Non tutti i pazienti sono buoni candidati per gli impianti, quindi assicurati di parlarne con il tuo dentista su quale opzione di trattamento è migliore per te.



Protesi rimovibili

Naturali e confortevoli

Scopri come possono essere le protesi rimovibili una soluzione ideale per i denti mancanti
Suggerimenti per la cura e la manutenzione della protesi dentaria



www.tcsdentalinc.com


Chiedi al tuo dentista se i prodotti TCS sono adatti a te.



Protesi totale



Protesi con 1-2-denti

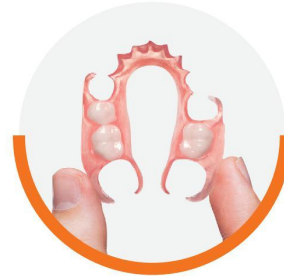

Protesi parziale

Gli adulti vivono una vita più lunga e più sana, non è insolito che le persone perdano uno o più denti durante la loro vita. Fortunatamente ci sono molte opzioni per la sostituzione dei denti, non devi preoccuparti che la protesi comprometta il tuo sorriso. Molti pazienti sono preoccupati per l'affidabilità di apparecchi temporanei o scheletrati con ganci metallici ed allora optano per soluzioni costose come gli impianti che richiedono un intervento chirurgico invasivo e un lungo periodo di guarigione.

Le protesi rimovibili TCS possono essere la scelta ideale.

Quando si tratta di decidere una sostituzione, bisogna considerare molti aspetti:

- costo, procedura, estetica, ecc.

Le decisioni relative alle cure dentistiche devono sempre essere prese in consultazione con il vostro dentista.

Le protesi parziali riempiono gli spazi vuoti creati dai denti mancanti e aiutano a prevenire lo spostamento dei denti naturali. Sarai felice di sentire che una protesi parziale ben adattata può offrire estetica e funzionalità meravigliose. I parziali flessibili TCS sono generalmente fabbricati senza fastidiosi ganci metallici che comprometteranno il tuo sorriso. In alcuni casi, il metallo può essere incorporato ma questa è una funzionalità decisa dal proprio dentista.

I parziali flessibili TCS offrono un grado di flessibilità ideale che consente ai parziali di flettersi con i contorni naturali della bocca per il massimo comfort. TCS offre due materiali di base per protesi parziali: iFlex™ e Unbreakable™. Chiedi al tuo dentista qual'è quello giusto per te.

Le protesi totali sostituiscono tutti i denti mancanti dell'arco superiore, dell'arco inferiore o di entrambi.

Indossare una protesi ben aderente non è solo essenziale per la salute, ma ringiovanirà anche il tuo aspetto. Karadent™ è una resina tecnologicamente avanzata utilizzata per la fabbricazione di protesi totali. Le protesi dentarie non idonee possono scivolare e

spostarsi causando disagio e imbarazzo. Karadent™ viene elaborato mediante iniezione ad alta pressione per una calzata precisa.

Karadent™ è privo di monomeri, rendendolo la scelta ideale per i pazienti sensibili alle tradizionali protesi acriliche.



La storia di Tiffany

Tiffany ha perso gran parte dei denti in un incidente automobilistico all'età di 12 anni.

Dopo aver indossato per molti anni una scomoda protesi parziale in metallo e acrilico che si spezzava costantemente, a Tiffany è stato finalmente prescritto un Unbreakable™ di TCS®. Tiffany finalmente indossa qualcosa su cui può contare, ha un bell'aspetto e si sente ancora meglio.



Gli apparecchi dentali TCS sono comodi, facili da curare e, soprattutto, nessuno si accorge che ne indossi uno.

La perdita dei denti può avere un forte impatto emotivo su alcune persone. Parlatene con il vostro dentista.

Eccellente igiene orale, corretta manutenzione della protesi e i controlli dentali regolari sono essenziali per la tua salute.

Chiedi al tuo dentista se i prodotti TCS sono adatti a te.



La storia di Tiffany

Tiffany ha perso gran parte dei denti in un incidente automobilistico all'età di 12 anni. Dopo aver indossato per molti anni una scomoda protesi parziale in metallo e acrilico che si spezzava costantemente, a Tiffany è stato finalmente prescritto un Unbreakable™ di TCS®. Tiffany finalmente indossa qualcosa su cui può contare, ha un bell'aspetto e si sente ancora meglio.



Protesi totale



Protesi con 1-2-denti



Protesi parziale

Gli adulti vivono una vita più lunga e più sana, non è insolito che le persone perdano uno o più denti durante la loro vita. Fortunatamente ci sono molte opzioni per la sostituzione dei denti, non devi preoccuparti che la protesi comprometta il tuo sorriso. Molti pazienti sono preoccupati per l'affidabilità di apparecchi temporanei o scheletrati con ganci metallici ed allora optano per soluzioni costose come gli impianti che richiedono un intervento chirurgico invasivo e un lungo periodo di guarigione. Le protesi rimovibili TCS possono essere la scelta ideale. Quando si tratta di decidere una sostituzione, bisogna considerare molti aspetti: - costo, procedura, estetica, ecc. Le decisioni relative alle cure dentistiche devono sempre essere prese in consultazione con il vostro dentista.

Le protesi parziali riempiono gli spazi vuoti creati dai denti mancanti e aiutano a prevenire lo spostamento dei denti naturali. Sarai felice di sentire che una protesi parziale ben adattata può offrire estetica e funzionalità meravigliose. I parziali flessibili TCS sono generalmente fabbricati senza fastidiosi ganci metallici che comprometteranno il tuo sorriso. In alcuni casi, il metallo può essere incorporato ma questa è una funzionalità decisa dal proprio dentista.

I parziali flessibili TCS offrono un grado di flessibilità ideale che consente ai parziali di flettersi con i contorni naturali della bocca per il massimo comfort. TCS offre due materiali di base per protesi parziali: iFlex™ e Unbreakable™. Chiedi al tuo dentista qual' è quello giusto per te.

Le protesi totali sostituiscono tutti i denti mancanti dell'arco superiore, dell'arco inferiore o di entrambi.

Indossare una protesi ben aderente non è solo essenziale per la salute, ma ringiovanirà anche il tuo aspetto. Karadent™ è una resina tecnologicamente avanzata utilizzata per la fabbricazione di protesi totali. Le protesi dentarie non idonee possono scivolare e

spostarsi causando disagio e imbarazzo. Karadent™ viene elaborato mediante iniezione ad alta pressione per una calzata precisa.

Karadent™ è privo di monomeri, rendendolo la scelta ideale per i pazienti sensibili alle tradizionali protesi acriliche.



Gli apparecchi dentali TCS sono comodi, facili da curare e, soprattutto, nessuno si accorge che ne indossi uno.

La perdita dei denti può avere un forte impatto emotivo su alcune persone. Parlatene con il vostro dentista.

Eccellente igiene orale, corretta manutenzione della protesi e i controlli dentali regolari sono essenziali per la tua salute.