

# iFlex™

## Il termoplastico facile da usare



- › Poliolefine termoplastico
- › Altamente estetico
- › Clinicamente infrangibile
- › Facile da ritoccare in studio
- › Non si macchia
- › Biocompatibile
- › Leggero ma resistente
- › Ideale grado di flessibilità
- › Alta traslucenza
- › Riparabile e ribasabile





## BENEFICI

Ideale per protesi parziali e unilaterali  
Soluzione economica ed estetica per i denti mancanti  
privo di metallo  
Faccette gengivali per mascherare le superfici radicolari esposte  
Ideale per pazienti allergici al monomero o al nichel  
Utilizzato come restauro di transizione durante il periodo di guarigione degli  
impianti o in presenza di tori, cancro orale, palatoschisi.



## SUGGERIMENTI

1. Per risultati ottimali utilizzare materiali da impronta in alginato.
2. Utilizzare frese in metallo per piccoli ritocchi e gomma marrone TCS per aree più estese. Usare una leggera pressione per non solcare il materiale.
3. Immergere il manufatto in acqua di rubinetto pulita molto calda per circa 1 minuto prima dell'inserimento iniziale. Quando si raffredda a una temperatura tollerabile , applicarlo delicatamente nel cavo orale del paziente.
4. Si consiglia TCS® Dental Appliance Cleaner ai pazienti per una ottimale cura e manutenzione della protesi nel tempo.



## COLORI DISPONIBILI



Light Pink | Standard Pink | Light/Dark Pink | Dark Pink | Natural

"Dopo molti anni trascorsi portando una scomoda protesi parziale in acrilico che si spezzava costantemente, il mio dentista mi ha prescritto un iFlex™. Finalmente posso sorridere e mangiare senza preoccupazioni. "

Ann, 36 anni

