

Karadent™

Polimero microcristallino semirigido per protesi totali, parziali semi-flessibili, ganci trasparenti e bite notturni



- › Altamente estetico
- › Senza BPA e monomeri
- › Massima resistenza e durabilità
- › Nessuna retrazione ed adattamento eccellente
- › Minimo assorbimento d'acqua
- › Facile e veloce da ritoccare in studio
- › Facile da riparare, o ribasare con acrilico





BENEFICI

Soluzione economica ed estetica per denti mancanti.

Privo di metallo.

Ideale per pazienti allergici al monomero o al nichel.

Utilizzato come restauro di transizione durante il periodo di guarigione degli impianti



SUGGERIMENTI

1. Per risultati ottimali, utilizzare materiali da impronta in alginato.
2. La regolazione di Karadent™ è semplice e veloce. È possibile regolarlo utilizzando la stessa tecnica delle protesi acriliche.
3. Utilizzare una fresa in metallo duro per effettuare piccole regolazioni ed una pietra montata verde per levigare l'area.
4. Per lucidare basta utilizzare la pasta verde Hi-Shine (articolo n. 4209-02)

5. Si consiglia TCS Denture Cleaner ai pazienti per rendere la protesi TCS duratura nel tempo.



COLORI DISPONIBILI



Standard Pink | Clear

scheletrato con ganci trasparenti



Combina l'indistruttibile
forza di TCS unbreakable con la
semplicità degli acrilici!!!
Tecnici e Dentisti non aspettavano altro.



bite notturno



tcs®