


# Unbreakable™

## Forza imbattibile

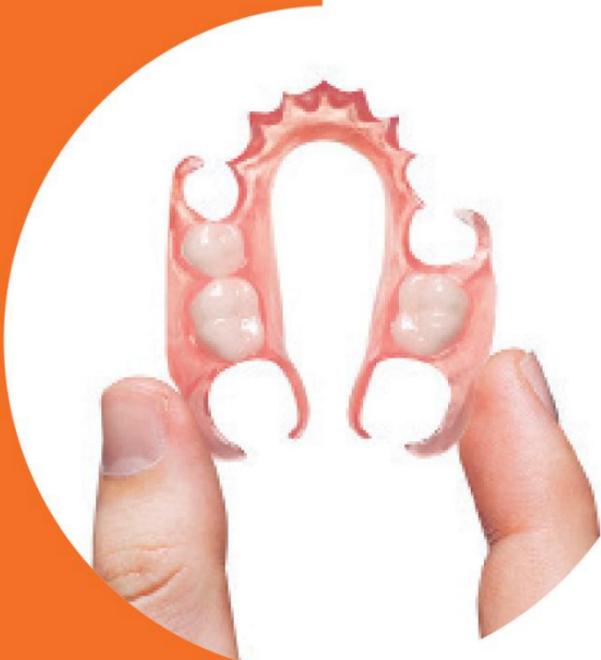

- › Nylon termoplastico
- › Estetico
- › Indistruttibile garantito
- › Leggero ma resistente
- › Ideale grado di flessibilità
- › Resistente alle macchie
- › Riparabile e riutilizzabile
- › Biocompatibile
- › Milioni di casi di successo





## BENEFICI

Ideale per protesi parziali e unilaterali

Soluzione economica ed estetica per i denti mancanti  
privo di metallo

Faccette gengivali per mascherare le superfici radicolari esposte

Ideale per pazienti allergici al monomero o al nichel

Utilizzato come restauro di transizione durante il periodo di guarigione  
degli impianti

Consigliato in presenza di tori, cancro orale e palatoschisi.



## SUGGERIMENTI

1. Per risultati ottimali, utilizzare materiali da impronta in alginato

2. Utilizzare TCS Green Points per effettuare piccoli ritocchi e TCS  
Brown punte in gomma per uniformare le aree ritoccate.

3. Per lucidare si raccomanda l'uso della pasta verde Hi-Shine  
(articolo n. 4209-02)

4. Immergere il parziale in acqua di rubinetto pulita molto calda per  
circa 1 minuto prima dell'inserimento iniziale e una volta  
raffreddatosi, inserirlo nella bocca del paziente. (Questo è consigliato  
solo per il 1° inserimento)

5. Consiglia TCS Denture Cleaner ai pazienti per un utilizzo ottimale.



## COLORI DISPONIBILI



Light Pink | Standard Pink | Light/Dark Pink | Dark Pink | Natural (clasps)

"Adoro la mia protesi parziale TCS. È comoda, facile da curare e soprattutto  
nessuno può dire che la sto indossando. "

Violette, 72 anni

