


Karadent™

Polimero microcristallino semirigido per protesi totale , protesi parziale semi flessibile, ganci trasparenti, scheletrati e night guards



MAI PIU' PROTESI ROTTE

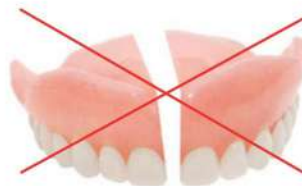

Prescrivi Karadent™ se desideri che venga realizzata una protesi confortevole, estetica, resistente alla rottura e durevole.

SUGGERIMENTI

1. Per risultati ottimali, utilizzare materiali da impronta in alginato .
2. Ritoccare Karadent™ è semplice e veloce. È possibile regolare il materiale utilizzando le stesse tecniche delle protesi acriliche.
3. Utilizzare una fresa in metallo duro per effettuare piccoli ritocchi ed una pietra verde per levigare l'area.
4. Per la brillantatura è consigliata la pasta per lucidare Blue Hi-Shine (articolo n. 4215-01).
5. Consigliare il TCS Denture Cleaner ai tuoi pazienti per la cura e l'igiene ottimale della protesi.



IPOALLERGENICO
PRIVO DI MONOMERO

Karadent™ by tcs®

Karadent™ di tcs™ è una resina microcristallina semi rigida, priva di monomeri, formulata per protesi totali, parziali semi-flessibili, ganci trasparenti, scheletrati trasparenti e night guards. Karadent™ combina la resistenza durevole dei nylon con la semplicità degli acrilici per creare un apparecchio comodo, estetico e affidabile.

INDICAZIONI

- > Protesi totali, protesi parziali, ganci trasparenti, scheletrati e protezioni notturne
- > Soluzione economica ed estetica per i denti mancanti
- > Pazienti con preoccupazioni per i restauri in metallo
- > Pazienti con allergie al monomero e / o al nichel
- > Restauro provvisorio durante il periodo di guarigione degli impianti
- > Parziali flessibili quando è necessaria una maggiore stabilità a causa del cattivo supporto dei tessuti o di pochi denti rimanenti.
- > Parziali flessibili quando è necessaria maggiore stabilità per le selle a estremità libera con denti mancanti dal 1° bicuspidato.

BENEFICI

- > Altamente estetico
- > Massima resistenza e durata
- > Nessuna contrazione del volume - vestibilità eccezionale
- > Assorbimento d'acqua minimo
- > Ritocchi della sella facili e veloci
- > Facile da riparare, rifare e ricollegare con l'acrilico (procedura di laboratorio)



Colori Disponibili



Rosa standard

Trasparente(ganci e scheletrati)