

# RIBASATURA

## iFlex™ e Unbreakable™ Guida dettagliata alla ribasatura



**1.**Prendere una impronta in alginato con il parziale nella bocca del paziente. Colare immediatamente il modello con il gesso.



**2.** Rimuovere il cucchiaio per impronte dal modello.



**3.**Rimuovere il materiale da impronta in eccesso per la registrazione del morso.



**4.**Preparare una mascherina in gesso



**5.**Rimuovere il parziale dal modello e duplicarlo



**6.**Rimuovere tutti i denti esistenti dalla protesi.



**7.**Posizionare i diattorici. Usa le apposite frese per ritenzioni sui denti.



**8.**Posizionare i denti nella mascherina in gesso e di conseguenza sulla cera.



**9.**Posizionare i canali di colata all'interno della muffola



**10.** Bollire la muffola ed applicare il separatore EZ-flow Separator



**11.**Iniettare e procedere alla rifinitura e lucidatura.

