

RIPARAZIONE



Riparazione iFlex™ e Unbreakable™ Guida dettagliata



1. Il dottore prende l'impronta del parziale in bocca.



2. Rimuovere il cucchiaio e valutare la riparazione. (Saranno aggiunti denti e ganci).



3. Duplicare con il parziale inserito



4. Duplicato



5. Rimuovere il parziale dal modello e posizionarlo nello stampo duplicato.



6. Così.



7. Versare il gesso e duplicare.



8. Non appena il gesso sarà indurito, rimuoverlo dalla gelatina ed assicurarsi di rimuovere ogni eccesso dalla zona che si intende riparare.





9.Prima di cerare ,considerare l'altezza linguale e lasciare spazio per cera e canali di iniezione



10.ceratura del segmento da riparare.

Nota: spazio creato per cera e canali di iniezione



11. Questa riparazione include ganci.



12.Mettere il caso in muffola avendo cura di ricoprirlo di gesso ovunque tranne nella zona da riparare.



13.inserire il canale di iniezione e versare il contro stampo.



14.Bollire. Per un risultato ottimale la muffola deve essere calda durante l'iniezione di riparazioni.



15.Applicare EZ Flow Separator solo sul gesso.

Nota: EZ Flow non deve essere in contatto con il Fusing Liquid.



16. Applicare una goccia di Fusing Liquid con un contagocce o un pennello sulla zona da riparare. Chiudere e iniettare.

Nota: la combinazione di muffola calda e Fusing Liquid è essenziale



Fusing Liquid
Item # 3812-01



17.Quando la muffola si raffredda,aprire e procedere a finitura e lucidatura.



RISULTATO FINALE

