

# Tecniche generali per parziali flessibili TCS

## Tecniche di impronta:

Uno dei molti vantaggi di portare una protesi TCS è che è necessaria una preparazione del dente quasi nulla. Il laboratorio ha solo bisogno di una buona impronta in alginato (colata velocemente), un modello antagonista e la registrazione del morso.

TCS raccomanda un materiale alginato per la presa d'impronta, tuttavia, materiali idrocolloidi, polivinile, silossano e polietere sono anche adatti per le impronte.

- Un'impronta accurata è il primo passo ed è la chiave del successo di un parziale TCS. Se viene presa un'impronta in alginato, è necessario colarla immediatamente con gesso da laboratorio. Quindi prendere una impronta dell' antagonista e una registrazione del morso.
- Esamina l'impronta. L'impronta dovrebbe avere tutti i dettagli anatomici per un parziale TCS di successo. Controlla anche vuoti e bolle d'aria.

## Cura adeguata:

Gli apparecchi TCS sono di facile manutenzione. Al fine di farli apparire come nuovi, per favore, fai in modo che i tuoi pazienti seguano queste semplici raccomandazioni:

- Continuare a lavarsi i denti e le gengive naturali come indicato.
- Pulire l'apparecchio quotidianamente. Risciacquare con acqua corrente calda per circa 10-30 secondi per rimuovere eventuali particelle di cibo.
- Spazzolare l'apparecchio con una spazzola morbida per protesi usando solo acqua. Risciacquare di nuovo
- Collocare l'apparecchio in un detergente per protesi per almeno 15 minuti al giorno.  
**Raccomandiamo il detergente concentrato TCS DENTURE CLEANER.**
- Se possibile, tenere l'apparecchio in acqua quando non indossato.

NON usare candeggina, dentifricio o prodotti per la pulizia simili, potrebbero graffiare o scolorire la superficie dell'apparecchio.



Si prega di fornire al paziente istruzioni per la cura della protesi assieme al campione di detergente concentrato TCS.