

Tecniche generali per parziali flessibili TCS

Preparazione per l'aggiunta di denti:

Il laboratorio utilizzerà una tecnica di saldatura o una tecnica di iniezione.

- Assicurarsi che il parziale sia privo di paste o adesivi prima di prendere l'impronta.
- Viene presa un'impronta in alginato con il parziale in bocca.
- Rimuovere l'impronta dalla bocca con il parziale incluso.
- Assicurarsi che il parziale sia completamente inserito nel materiale da impronta
- Colare immediatamente il modello con un normale gesso giallo ,quindi inviare il tutto al laboratorio .

Preparazione alla ribasatura:

Il laboratorio registrerà la posizione dei denti con una impronta di gesso e rimuoverà la base esistente. Una nuova base sarà incerata e rielaborata usando i denti esistenti.

Nella maggior parte dei casi in cui è necessario ribasare, la protesi viene realizzata con una nuova base.

Note:per la re-inserzione usare acqua calda